

FLASH LIFTING PRO

PUESTA EN MARCHA:

CONECTE EL EQUIPO A LA RED ELECTRICA.

SE ESCUCHARA UN BEEP, LARGO. POR UNOS SEGUNDOS ENTRA EN MODO TESTEO.

LUEGO VERA UN EFECTO DESLIZANTE DE LAS LUCES DE POTENCIA. ESTO LE INDICA QUE ESTÁ EN EL MODO INACTIVO.

AL PULSAR EL PULSADOR ALOJADO EN LA PARTE INFERIOR, ESCUCHARA UN BREVE BEEP. EL QUE LE INDICA QUE ESTÁ INGRESANDO AL MODO PROGRAMACIÓN. PULSANDO NUEVAMENTE VERÁ ENCENDER LOS LED ROJOS EN FORMA PARPADEANTE. LO QUE LE ESTARÁ INDICANDO QUE ESTÁ EN MODO PROGRAMACIÓN. DESDE ESE MOMENTO Y EN LOS TRES NIVELES DE PROGRAMACION TIENE 10 SEGUNDOS PARA EFECTUAR CADA PASO.

UNA VEZ, CUMPLIDO EL TIEMPO MENCIONADO DE 10 SEGUNDOS ESCUCHARÁ TRES BEEP SEGUIDOS. QUE LE ESTARAN INDICANDO, QUE SE TRASLADA A LA SIGUENTE ETAPA DE PROGRAMACION.

LAS ETAPAS SON:

SELECCIÓN DE PROCEDIMIENTO.

SELECCIÓN DE TIEMPO.

SELECCIÓN DE POTENCIA.

LOS DLT, SIEMPRE ESTAN ENCENDICOS DURANTE TODO EL TRATAMIENTO.

UNA VEZ, EFECTUADO LOS PASOS DE SELECCIÓN ESCUCHARA TRES BEEP. ANUNCIANDO EL COMIENZO DEL TRATAMIENTO.

Los tratamientos a seleccionar son: RF tripolar, microcorrientes, corriente galvanica y booster de colágeno.

Ya es conocido el tratamiento de RF tripolar, la diferencia puntual con este equipo es que a su vez aplica luz emitida por los DTL en la longitud de onda del colágeno, quintuplicando su efecto.

El manipulo se pasa en forma circular con gel neutro como transporte.

Las microcorrientes sirven para incrustar substancias a través de la piel, o sea en forma similar al electroporador.

Las viejas corrientes galvánicas, remozadas con la tecnología actual también permiten el pasaje de sustancias a través de la piel.

Todo componente activo que se quiera utilizar es posible gracias al Flash Liftig Pro