


MANUAL DE USUARIO

RF 2010

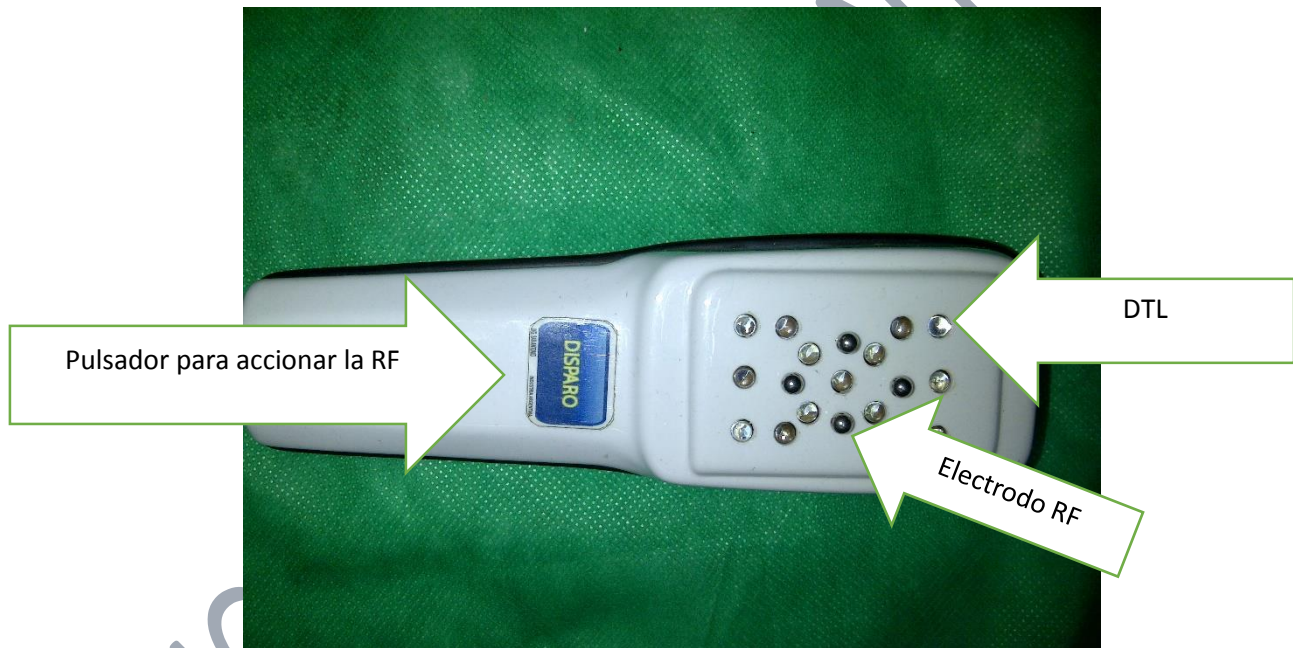

Forma de uso

Conecte el equipo a la red de 220v.

El manipululo trabaja por luz roja de 640nm, la cual aumenta la producción de colágeno y elastina.

Al pulsar el swtich de disparo se acciona la parte de RF.

Como transporte se utiliza gel neutro en pasadas sobre la piel, según sea lo que vamos a tratar.

Si se usa para modelar, ayudaremos con las manos el paso del cabezal como si se estuviera modelando.

En rellenos usamos ácido hialuronico.

1: 22-11-12 **2:** 22-11-12 **3:** 30-11-12
7' DESPUÉS **1 SEMANA DESPUÉS**





4 SESIONES



RF FOTODINAMICA

Liftin facial



La radiofrecuencia fotonica de Ingeniería San Antonio emite micro-impulsos de luz roja con una longitud de onda de 640nm (la cual hace que los tejidos regeneren colágeno) que logran calentar la zona tratada haciendo que nuestro cuerpo reaccione enviando a la zona todos los elementos regeneradores que posee (éste es uno de los efectos del proceso natural de renovación de tejidos que se va haciendo más lento a medida que pasan los años).

Entre todas las reacciones que este proceso desencadena, una es la generación de nuevo colágeno de calidad similar al de nuestra juventud, con lo cual se consigue el tan buscado “efecto liftin”, debido a la retracción de la piel en la zona tratada.

La Radiofrecuencia fotonica “despierta” la capacidad de nuestros tejidos de renovarse y regenerarse nuevamente.

- Los efectos inmediatos más visibles son

- *Piel más firme y tersa*
- *Mejillas más turgentes y elevadas*
- *Firmeza y definición del contorno del rostro*
- *Alisado de arrugas y líneas de expresión*
- *Disminución de los surcos naso genianos*
- *Reducción de papada*
- *Reducción de bolsas y ojeras*
- *Cejas más elevadas y párpados más firmes*

- Otros efectos

- **Oxigena y Nutre:** aumentando la circulación sanguínea, irrigando sangre arterial que contiene oxígeno y nutrientes que habitualmente no llegan a la piel debido a que nuestro sistema deja de suministrarla ante cualquier desequilibrio de la salud; sean unas noches de mal descanso, estrés o enfermedades serias.

- **Desintoxica:** Este tipo de calor también facilita que las toxinas se dividan en partículas más pequeñas y de esta forma la linfa puede recogerlas y eliminarlas por la orina. Por esto también se lo recomienda en caso de necesitar drenaje linfático (ej.: luego de una cirugía). En nuestro centro te ofrecemos los dos complementos perfectos de la Radiofrecuencia.
- **Estimulación Muscular:** el músculo también pierde firmeza con los años. La Radiofrecuencia actúa afirmando todo el tejido que se encuentra sobre el músculo (llamado tejido conectivo); y si afirmamos también el músculo con electroestimulación, el tejido conectivo tiene mejor sostén, logrando un mayor efecto liftin y una mayor duración del resultado obtenido.
- **Productos Cosméticos:** aplicando altas concentraciones de principios activos de la mejor calidad, para conseguir una acción en capas profundas de la epidermis y llegando algunos a la dermis. En gabinete: Peeling + Hidratación Profunda + Nutrición + Alisado de Líneas; en domicilio: Kit de Productos combinado para cada paciente. Si el paciente decide utilizar las 3 terapias realiza un verdadero liftin en 3 niveles: Músculo (electro-estimulación y ejercicios); Tejido Conectivo–Dermis (Radiofrecuencia) y Epidermis (Productos Cosméticos que, en nuestro caso, también revitalizan la Dermis).

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Cuántas sesiones realizamos en total y por qué?

R: Para un tratamiento completo realizamos 15 sesiones porque de esta manera, con la cantidad de colágeno generado nos aseguramos de que el resultado dure hasta 2 años.

P: ¿Con que frecuencia se deben realizar estas sesiones?

R: Lo habitual es realizar 2 sesiones semanales el primer mes y luego se puede tanto continuar con ese ritmo el mes siguiente, como realizar 1 sesión semanal hasta completar las 15 sesiones.

En caso de necesidad del paciente (que este apurado por un evento, o que no viva en esta ciudad) se pueden realizar hasta 5 sesiones por semana durante 3 semanas, o 3 a 5 sesiones durante 1 semana cada mes, o 2 sesiones cada 15 días. Esto se define de acuerdo a la necesidad y posibilidad del paciente según lo asesore el profesional.

P: ¿Qué sucede si realizo algunas sesiones y luego interrumpo el tratamiento?

R: Se mantiene el efecto logrado (por menos tiempo). En algunos casos se comienza un tratamiento programando la mitad de las sesiones antes de un viaje o una cirugía y la otra mitad luego.

P: ¿Cuándo se notan los primeros cambios?

R: Los primeros cambios se notan en la primera sesión, y se hacen más evidentes si realizamos primero un lado de la cara y comparamos. En muy pocos casos si el colágeno está muy deteriorado o la piel ha sido maltratada durante largo tiempo, puede demorar algunas sesiones más (2 o 3).

INGENIERIA SAN ANTONIO